


# Stick urine THC - OPI - COC - AMP


www.testdiagnostici.it

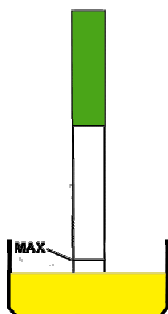

Mettere una piccola quantità di urine in un contenitore pulito e asciutto, immergere lo stick non oltre la linea indicata con MAX.

Lasciare lo stick per 10-15 secondi, toglierlo dal contenitore e adagiarlo su un piano.

Dopo qualche minuto guardare il risultato nella finestra e verificare una delle seguenti possibilità:

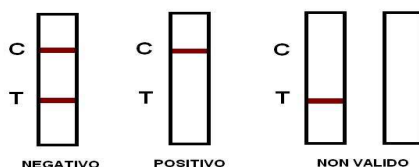

**Negativo:** compaiono due bande colorate (generalmente di colore rosastro), una in corrispondenza della zona di controllo ( C ) e una seconda linea in corrispondenza della zona reattiva ( T ). Il risultato negativo indica che la concentrazione della droga nell'urina è al di sotto del cut-off rilevabile. Va considerato negativo anche quando si presenta una debole banda colorata (comunque visibile).

**Positivo:** compare una sola banda colorata (generalmente di colore rosastro), in corrispondenza della zona di controllo ( C ). Il risultato positivo indica che la concentrazione della droga nell'urina è superiore al cut-off rilevabile.

**Non Valido:** Non compare la banda colorata nella zona di controllo ( C ), anche se compare la banda in corrispondenza della zona reattiva ( T ). Il test deve essere ripetuto.

## LIMITI

1. Potrebbero verificarsi degli errori nell'esito dei test qualora nel campione d'urina ci fossero sostanze adulteranti quali candeggina, in tal caso bisogna ripetere il test.
2. Il risultato positivo indica la presenza della droga o dei suoi metaboliti ma non il livello di intossicazione, la via di somministrazione o la concentrazione nelle urine.
3. Un risultato negativo non significa che il campione di urina sia totalmente privo di droga ma indica che è sicuramente al di sotto della soglia minima di rilevabilità.
4. **Attenzione:** il test non è in grado di distinguere tra la presenza di droga o un medicinale contenente la stessa sostanza ( ad esempio alcuni sciroppi per la tosse contengono CODEINA che è un oppiaceo)
5. La presenza di certi integratori potrebbe dare risultati positivi

**ATTENZIONE:** Gli stick vanno conservati ad una temperatura tra i 5 - 30°C (non in frigo)

www.testdiagnostici.it



D.o.A.  
Drugs of Abuse

Tel. +39 340.12.47.433  
Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 16  
E-mail: info@testdiagnostici.it