


TEST OVULAZIONE

www.testdiagnostici.it

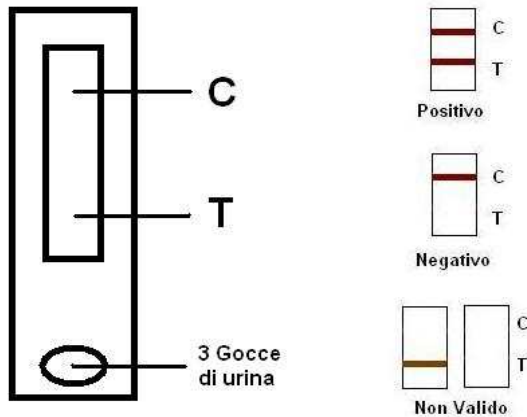

Questi test contengono una striscia reattiva che a contatto con l'urina cambia colore indicando o meno lo stato di fertilità.

Lo stick di plastica è dotato di una finestrella dove devono comparire due strisce colorate: una di controllo (C), si colora se il test è stato eseguito in maniera corretta, l'altra è quella del test (T) e indica, se si colora, la positività del test, quindi confermando lo stato di fertilità

1) Non usare la prima urina del mattino, meglio raccogliere la sua urina durante il giorno, ogni giorno alla stessa ora. Ridurre l'ingestione di liquidi per le 2 ore precedenti il test in modo da evitare una eccessiva diluizione dell'urina che potrebbe falsare il picco di LH

2) Prelevi col contagocce alcune gocce di urina e metta 3 gocce nella finestrella rotonda

3) Aspetti alcuni secondi e guardi se compaiono le linee colorate nella zona reattiva. Secondo la concentrazione dell' LH nell'urina, i risultati positivi possono essere osservati in 40 secondi. (Per avere una conferma sicura dei risultati negativi, attendere il tempo di reazione completo: 10 minuti). Non legga o non tenga conto dei risultati dopo 30 m

Negativo - Nessun Picco dell' LH:

Soltanto **una riga** colorata compare sulla regione di controllo (C) o la riga del test (T) è presente ma è molto sbiadita in confronto all'intensità della riga di controllo. Non c'è picco dell' LH anche se sono presenti due linee - finché la linea del test è più sbiadita della linea di controllo il risultato è negativo.

Positivo - Picco dell' LH:

Se **due righe** di colore sono visibili e la riga del test è quasi uguale o più scura della riga di controllo, l'ovulazione probabilmente ci sarà entro 24-48 ore. Per aumentare le probabilità di gravidanza, il momento migliore per fertilizzare l'uovo è fra 24 ore e 48 ore.

Non valido - Risultati Incerti:

Nessuna riga è visibile nelle zone di controllo e di test. Si ripeta il test stando attenti a seguire fedelmente la procedura.

Per quando fare il test consultare il foglio illustrativo di questo prodotto sul sito internet.

ATTENZIONE: Gli stick vanno conservati ad una temperatura tra i 5 - 30°C (non in frigo)

www.testdiagnostici.it



**D.o.A.
Drugs of Abuse**

Tel. +39 340.12.47.433
Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 16
E-mail: info@testdiagnostici.it